

SÅDAN FÅR DU SVAR

Vi sender dig en email eller sms, når svaret på din test er klar. Her modtager du en personlig kode, som du kan bruge til at finde dit svar på **www.klamydiahjemmetest.dk**.

Vi kontakter dig kun, når dit testsvar er klar.

HJEMMETEST

VEJLEDNING TIL SKEDETEST FOR KLAMYDIA OG GONORÉ

SÅDAN SENDER DU TESTEN



TRIN 5

Send kuverten som post samme dag som prøven er taget, men det er vigtigt du kun sender den mandag til onsdag, så prøven ikke forældes.

Du kan ikke sende kuverten med prøven via en rød postkasse. Send den på posthus via PostNord.

Find dit nærmeste posthus på **www.postnord.dk**




VIGTIGT

- ▶ Testen virker først to uger efter, du har haft ubeskyttet sex. Vent derfor til de to uger er gået, inden du tager testen.
- ▶ Testen har en begrænset holdbarhed på cirka tre måneder. Tag den derfor hurtigst muligt, men sørg for, at du kun sender den mandag til onsdag, så den ikke forældes under forsendelsen.
- ▶ Gå til lægen, hvis du er bekymret for, at du kan være smittet med andre seksygdomme end klamydia/gonorré.


SEX
SAMFUND

SÅDAN TAGER DU TESTEN

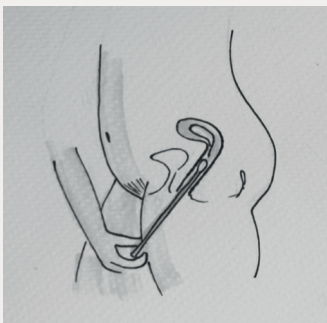

TRIN 1

Du skal indføre vatpinden ca. 5 cm. op i din skede. Drej vatpinden rundt i 10-30 sekunder. Det er vigtigt, at du holder midt på vatpinden.

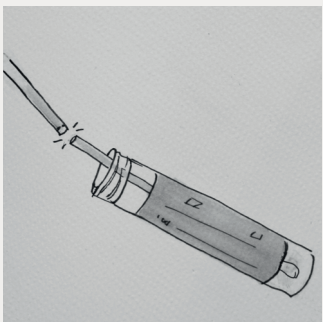


TRIN 2

Skrul låget af det lille vedlagte glas, og hæld ikke væsken i glasset ud. Stik prøveenden af vatpinden ned i det lille vedlagte glas og knæk forsigtigt den øverste del af vatpinden af.

Smid denne del ud. Skru derefter låget fast på prøveglasset.


SÅDAN PAKKER DU TESTEN

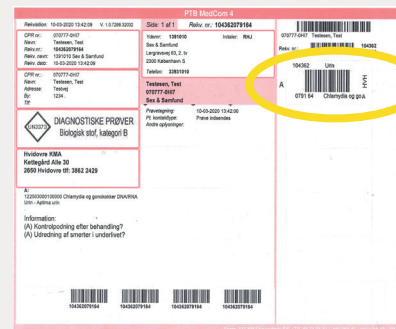

TRIN 3

Tag det nederste klistermærke med strejkode af fra den vedlagte prøveseddel. Det sidder i højre side af sedlen og har et A ud for sig.

Placer klistermærket lodret på prøveglasset.

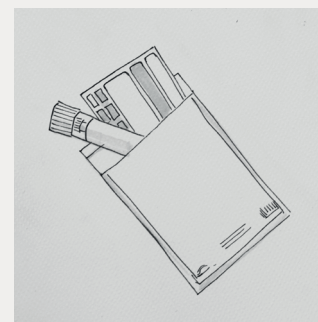

TRIN 4

Læg prøveglasset med vatpinden og prøvesedlen ned i den hvide kuvert.

Se bagsiden for at læse, hvordan du sender kuverten.